

Erland Care

ERLAND CARE – STOMA PAD

1. PRODUKTBESKRIVELSE

Erland Care Superabsorbent Pad er et nytt alt i ett produkt som sikrer trygt og stabilt feste av pose og plate. Dette reduserer risikoen for lekkasje under platen. Den superabsorberende puten er festet direkte på huden og absorberer et høyt volum væske fra stomiposer der limet har løst seg.

Produktet består av:

- Et perforert mykt, skånsomt, silikon hudkontaktlag
- En indre pute som har sterke vannholdende egenskaper
- En pustende polyuretanfilm

Vær oppmerksom på:

Erland Care er kun indikert for ekstern bruk.

Erland Care er ikke-steril og må ikke brukes ved infeksjoner.

2. INDIKASJON

Erland Care er utviklet for stomiposebrukere, hvorav mange har problemer med at limet på stomiposen løsner og lekkasje av poseinnholdet. Ved å feste Erland Care på utsiden av stomiposens festeplate reduserer man risiko for lekkasje, og eventuell lekkasje bli absorbert av puten. Dette tillater brukeren å unngå siver i klær og få tid til å skifte ut stomiposen.

3. FORHOLDSREGLER

Produktet er til engangsbruk og må ikke brukes på nytt.

Gjenbruk av engangsprodukter utgjør en stor risiko for brukeren. Det kan føre til forurensning og/eller svekkelse av produktets funksjonalitet. Forurensning og/eller nedsatt funksjonalitet kan føre til alvorlig personskade eller død.

4. KONTRAINDIKASJONER

Erland Care superabsorbent er kontraindisert for:

- magesår som skyldes infeksjon som tuberkulose eller syfilis
- dype soppinfeksjoner
- tredjegrads forbrenning
- pasienter som er allergiske mot superabsorberende materialer

Hvis det oppstår tegn på irritasjon eller infeksjon, må du kontakte lege.

Fortsett bruk når normalt helbredelsesforhold er til stede.

Erland Care

5. SIKKERHETSINFORMASJON

Erland Care må bare brukes til sammen med stomipose og plate.

6. INFORMASJON FOR BRUK

6.1 For vanlig bruk med stomi brukes Erland Care som følger:

1. Rengjør det peristomale området forsiktig
2. Fjern Erland Care-produktet fra pakningen
3. Fest stomiposen som vanlig
4. Trekk hele stomiposen gjennom det midtre hullet i Erland Care for å plassere den under stomiposen, men på toppen av den selvklebende overflaten til stomiposen.
Den siden som er belagt med beskyttende fôr, må vende innover
5. Fjern en av de beskyttende underlagene og glatt produktet forsiktig på plass.
Fjern den resterende flippen og fortsett å glatte produktet på plass.
6. Det er viktig å unngå rynker. Forsøk å oppnå en så jevn overflate som mulig (kan være vanskelig å oppnå i utgangspunktet, men forbedres med fortsatt utjevning)

6.2 Absorberende fjerning / endringer.

Volumet av væske i superabsorbenten bestemmer intervallet mellom skiftene av produktet.
Det bør skiftes før superabsorbenten blir mettet.

Brukstid > 24 timer.

7. SPESIELLE NOTER

Erland Care er en engangsartikkel. Når produktet er fjernet fra emballasjen og tape er fjernet, klassifiseres produktet som brukt og bør ikke fjernes og ikke brukes igjen.

Produsent:
Global Health Technology AS,
Postboks 569 Sentrum
4003 Stavanger, Norge

www.globalhealthtechnology.no