

ISTRUZIONI PER L'USO

NOME DEL PRODOTTO:

Erland Care - Protective Skin

1. DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Protective Skin è una medicazione superassorbente in silicone impermeabile. Protective Skin può essere utilizzata per il trattamento di ferite da moderatamente a fortemente essudanti. La medicazione è adatta a utenti con pelle sottile e agli utenti facilmente esposti a danni alla pelle. Protective Skin è sottile e flessibile e può essere facilmente applicata anche sulle articolazioni, per le quali sarebbe altrimenti difficile trovare medicazioni funzionali in grado di aderire bene alla pelle. Protective Skin può essere facilmente attaccata e rimossa dalla pelle senza danneggiarla.

In presenza di fluidi provenienti dalla ferita, le fibre superassorbenti del cuscinetto formeranno un gel che aiuterà a mantenere un ambiente umido per favorire le naturali condizioni di guarigione.

I prodotti Protective Skin possono essere utilizzati anche come medicazione per ferite peristomiali, come protezione e copertura per stomia e come piastra protettiva per la pelle dello stoma.

Protective Skin è composta da:

- Uno strato di contatto in silicone morbido traforato
- Un cuscinetto interno con forti proprietà di ritenzione dei fluidi.
- Una pellicola in poliuretano traspirante

Nota:

- Protective Skin è solo per uso esterno
- Protective Skin non è sterile e non deve essere utilizzata per le infezioni
- Protective Skin non arresta le emorragie

2. INDICAZIONI:

I prodotti Protective Skin possono essere applicati su ferite asciutte e da moderatamente a fortemente essudanti come: Piaghe da decubito, ulcere da stomia, coperture per stomia, ulcere venose e arteriose delle gambe, ulcere da diabete, ustioni di primo e secondo grado e ferite traumatiche.

I prodotti possono essere utilizzati anche sopra altri prodotti. È possibile stratificare diverse medicazioni l'una sull'altra nei casi in cui vi sia una notevole fuoriuscita di fluidi dalla ferita.

3. CONTROINDICAZIONI

Protective Skin è controindicata in caso di:

- Ferite aperte. In presenza di ferite aperte, è necessario posizionare sopra la ferita una medicazione primaria. Protective Skin viene quindi posizionata sopra la medicazione primaria per assorbire i fluidi
- Ulcere derivanti da infezioni come la tubercolosi o la sifilide
- Ustioni di terzo grado
- Pazienti allergici a materiali superassorbenti e/o al silicone

In presenza di qualsiasi segno di irritazione o infezione o se le condizioni della ferita peggiorano, contattare l'autorità medica competente. Riprendere l'uso quando vengono ripristinate le normali condizioni di guarigione.

4. PRECAUZIONI

Il prodotto non è omeostatico.

5a. ISTRUZIONI DI UTILIZZO

1. Pulire accuratamente l'area della ferita con un liquido disinfettante/neutro.
2. Rimuovere Protective Skin dalla confezione.
3. Tirare delicatamente una delle due parti in plastica e attaccare la medicazione alla pelle. Ripetere l'operazione con l'altra metà.
4. È importante evitare la formazione di grinze. Cercare di rendere la superficie della medicazione il più liscia possibile.

Nota:

Se si utilizza Protective Skin come piastra protettiva per la pelle sotto la sacca per stomia:
Dopo il punto 2, praticare un foro nella medicazione delle dimensioni dello stoma.

5b. RIMOZIONE/CAMBIO DELLA MEDICAZIONE

L'intervallo di sostituzione della medicazione Protective Skin è determinato dal volume dell'essudato. Sostituire immediatamente la medicazione quando diventa satura. La capacità del superassorbente di assorbire i fluidi determina una minore frequenza di sostituzione della medicazione.

6. NOTE SPECIALI

Protective Skin è un articolo monouso. Una volta rimosso dal sacchetto, il prodotto viene classificato come usato. Non deve pertanto essere riutilizzato.

Prodotto da:
Global Health Technology AS,
P.O. Box 569 Sentrum,
4003 Stavanger, Norway

www.globalhealthtechnology.no