

BRUKSANVISNING

PRODUKTNAMN:

Erland Care - Protective Skin

1. PRODUKTBESKRIVNING

Protective skin är ett vattentätt superabsorberande förband av silikon. Protective Skin kan absorbera allt från måttliga till kraftigt exuderande sår. Förbandet lämpar sig för användare med tunn hud och användare som lätt exponeras för hudskador. Protective Skin är tunt och flexibelt och kan enkelt appliceras i leder där det annars kan vara svårt att hitta funktionella förband som sitter bra på huden. Protective skin kan enkelt fästas på och tas bort från huden utan att det lossnar hud.

I närvaro av sårvätskor kommer de superabsorberande fibrerna i dynan att bilda en fuktig gel som bidrar till att upprätthålla en fuktig miljö som främjar förhållanden för naturlig läkning.

Protective Skin-produkterna kan också användas som förband för peristomala sår, om skydd och stomilock och som stomiskyddsplatta.

Protective Skin består av:

- ett perforerat kontaktskikt av mjukt silikon
- en inre dyna med mycket bra vätskebindande egenskaper.
- en ventilerande polyuretanfilm

Observera:

- Protective Skin är endast avsett för externt bruk
- Protective Skin är icke-steril och får inte användas för infektioner
- Protective Skin stoppar inte blödningar

2. INDICERINGAR:

Protective Skin-produkterna kan appliceras på torra och måttligt till kraftigt exuderande sår, såsom: liggsår, stomisår, stomilock, venösa och arteriella bensår, diabetessår, första och andra gradens brännskador och traumatiska sår.

Produkterna kan också användas ovanpå andra produkter. Flera förband kan läggas på varandra i fall där det finns betydande mängder sårvätskor.

3. KONTRAINDIKATIONER

Protective Skin är kontraindicerat för:

- Öppna sår. Vid öppna sår placeras ett primärt förband över såret. Därefter placeras Protective Skin ovanpå det primära förbandet för att absorbera vätskorna
- sår som är resultatet av en infektion, såsom tuberkulos eller syfilis
- tredje gradens brännskador
- patienter som är allergiska mot superabsorberande material och/eller silikon

Vid tecken på irritation eller infektion eller om sårillståndet försämras, kontakta lämplig medicinsk myndighet. Återuppta användningen när såret läker normalt.

4. FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER

Produkten är inte homeostatisk.

5a. ANVÄNDARINSTRUKTIONER

1. Rengör försiktigt sårområdet med hjälp av desinfektionsmedel/neutral vätska.
2. Ta ut Protective Skin-produkten från förpackningen.
3. Dra försiktigt bort den ena av de två plastdelarna och fäst förbandet på huden. Gör därefter samma sak med den andra halvan.
4. Det är viktigt att undvika att det uppstår veck i förbandet. Försök att få förbandsytan att bli så slät som möjligt.

OBS!

Om du använder Protective Skin som hudplatta under stomipåsen:
Skär ett hål i förbandet motsvarande storleken på stomin efter punkt 2.

5b. BORTTAGNING/BYTE AV FÖRBAND

Volymen av exsudat avgör hur ofta Protective Skin-förbandet behöver bytas. Produkten bör bytas ut så snart den är helt mättad. Superabsorbentens förmåga att absorbera vätskor resulterar i färre förbandsbyten.

6. SÄRSKILDA ANMÄRKNINGAR

Protective Skin är en engångsartikel. När produkten har tagits ut ur påsen klassificeras den som använd. Produkten får då inte återanvändas.

Tillverkad av:
Global Health Technology AS,
P.O. Box 569 Sentrum,
4003 Stavanger, Norge

www.globalhealthtechnology.no