

1. PRODUKTBESCHREIBUNG

Das Erland Care Superabsorbent Pad ist ein neues Komplettprodukt, das eine sichere und stabile Befestigung von Beutel und Platte gewährleistet. Dadurch wird das Risiko von Leckagen unter der Platte reduziert. Das superabsorbierende Pad wird direkt auf der Haut befestigt und absorbiert ein hohes Ausflussvolumen aus Stomabeuteln, wo sich der Klebstoff aufgelöst hat.

Dieses superabsorbierende Produkt setzt sich zusammen aus:

- einer perforierten, weichen und hautschonenden Silikon-Hautkontaktschicht
- einer Einlage mit hoher Flüssigkeitsaufnahmekapazität
- einer atmungsaktiven Polyurethan-Folie

Bitte beachten Sie:

Erland Care ist nur für den externen Gebrauch bestimmt.

Erland Care ist unsteril und darf nicht bei Infektionen eingesetzt werden.

2. INDIKATION

Erland Care wurde für die vielen Stomabeutel-Benutzer entwickelt, die Probleme mit der Auflösung des Klebstoffs am Stomabeutel und dem Auslaufen von Beutelinhalt haben. Durch die Anbringung von Erland Care an der Außenseite der Klebescheibe des Stomabeutels wird das Risiko einer Leckage durch die Stabilisierung des Pads reduziert, während etwaige Leckagen vom Pad absorbiert werden. So wird eine Verschmutzung der Kleidung vermieden und erhält der Benutzer mehr Zeit zum Wechseln des Stomabeutels.

3. VORSICHTSMASSNAHMEN

Es handelt sich um ein Einwegprodukt, das nicht wiederverwendet werden darf.

Die Wiederverwendung von Einwegprodukten stellt ein großes Risiko für den Anwender und Patienten dar. Es kann zu einer Kontamination und/oder Beeinträchtigung der Funktionalität des Produkts führen. Und eine Kontamination und/oder beeinträchtigte Funktionalität des Produkts kann zu schweren Entzündungen bis hin zum Tod führen.

4. GEGENANZEIGEN

Erland Care superabsorbierend ist kontraindiziert:

- Bei Geschwüren als Folge einer Infektion wie Tuberkulose oder Syphilis
- Bei tiefen Pilzinfektionen
- Bei Verbrennungen dritten Grades
- Bei allergischen Reaktionen gegen die superabsorbierenden Materialien

Falls Anzeichen einer Reizung oder Infektion auftreten sollten, wenden Sie sich an die zuständige medizinische Autorität. Die Anwendung kann nach Erreichen eines normalen Heilungszustandes wieder aufgenommen werden.

5. SICHERHEITSHINWEISE

Erland Care darf nur für Stoma-Anwendungen verwendet werden.

6. INFORMATIONEN ZUM GEBRAUCH

6.1 Für die normale Anwendung bei einem Stoma wird Erland Care wie folgt angewendet:

1. Reinigen Sie sorgfältig den Peristomalbereich
2. Nehmen Sie das Erland Care-Produkt aus der Verpackung
3. Befestigen Sie den Stomabeutel wie üblich
4. Ziehen Sie den Stomabeutel komplett durch die zentrale Öffnung des Erland Care, um es unter dem Stomabeutel auf dessen Klebefläche zu positionieren.
Die mit der Schutzfolie beschichtete Seite muss zum Körper weisen.
5. Entfernen Sie eine der Schutzfolien und drücken Sie das Produkt behutsam an Ort und Stelle an.
Entfernen Sie die verbliebene Schutzfolie und drücken Sie das Pad weiter an seinen Platz an.
6. Es ist wichtig, keine Falten zu bilden. Versuchen Sie, eine möglichst glatte Oberfläche zu erzielen (das kann anfangs schwierig sein, wird mit weiterem Glätten jedoch besser)

6.2 Entfernen und Wechseln des Absorptionsmaterials.

Wie oft das Erland Care erneuert werden muss, hängt von der Menge des Exsudats ab. Es sollte auf jeden Fall sofort gewechselt werden, sobald es vollgesogen ist.

Tragedauer max. 24 Stunden.

7. BESONDERE HINWEISE

Erland Care ist ein Einwegartikel. Nach der Entnahme aus der Verpackung und dem Entfernen der Schutzfolien gilt das Produkt als gebraucht und darf nach der Entfernung nicht erneut verwendet werden.