

## 1. TERMÉKLEÍRÁS

Az Erland Care extra nedvszívó képességű párna új, többfunkciós termék, amellyel biztonságosan és stabilan rögzíthető a zsák és az alaplap. Ez csökkenti az alaplap alatti szivárgás kockázatát. Az extra nedvszívó képességű párna közvetlenül a bőrre tapasztható, és a sztómazsákból kifolyó nagy mennyiségű anyagot képes felszívni azon a területen, ahol a ragasztóanyag feloldódott.

Az extra nedvszívó képességű termék részei:

- egy puha, perforált, szilikon réteg, amely a bőrrel érintkezik
- egy belső, párna erős vízmegtartó tulajdonságokkal
- egy lélegző poliuretán réteg

### **Megjegyzés:**

Az Erland Care kizárólag külsőleges használatra készült.

Az Erland Care nem steril, ezért fertőzések esetén nem használható.

## 2. RENDELTTETÉS

Az Erland Care terméket sztómazsákokat használó páciensek számára fejlesztettük ki. Az ilyen páciensek jelentős részének problémát okoz a sztómazsák ragasztóanyagának feloldódása és a zsák tartalmának szivárgása. Ha az Erland Care terméket a sztómazsák öntapadó korongjához rögzítik, az alaplap stabilizálása révén csökkenti a szivárgás kockázatát, és minden szivárgó folyadékot felszív. Így a sztómazsák tartalma nem szivárog a ruhába, és a zsákot ritkábban kell cserélni.

## 3. ÓVINTÉZKEDÉSEK

### **A termék egyszer használatos, egy részből álló eszköz.**

Az egyszer használatos termékek ismételt használata nagy kockázatnak teszi ki a felhasználót vagy páciensét. Ez fertőzéshez és/vagy a termék csökkent hatékonyságú működéséhez vezethet. A fertőzés és/vagy a termék csökkent hatékonyságú működése súlyos sérülést vagy halált okozhat.

## 4. ELLENJAVALLATOK

Az Erland Care extra nedvszívó képességű párna használata ellenjavallott az alábbi esetekben:

- fertőzés, például tuberkulózis vagy szifilisz okozta fekélyek
- belső gombás fertőzések
- harmadfokú égési sérülések
- az extra nedvszívó képességű anyagokra allergiás páciensek

Irritáció vagy fertőzés kialakulása esetén forduljon az illetékes egészségügyi hatósághoz. A termék használata csak a teljes gyógyulás után folytatható.

## 5. BIZTONSÁGI TUDNIVALÓK

Az Erland Care kizárólag sztóma esetén használható.

## 6. HASZNÁLATI UTASÍTÁS

### 6.1. Sztóma esetén, normál használathoz az Erland Care termék alkalmazása a következő:

1. Óvatosan tisztítsa meg a sztóma környékét
2. Vegye ki az Erland Care terméket a csomagból
3. Rögzítse a sztómazsákot a szokásos módon
4. Húzza át a teljes sztómazsákot az Erland Care közepén található nyíláson úgy, hogy az a sztómazsák alatt, és a sztómazsák öntapadós felülete felett helyezkedjen el. A védőbetéttel borított oldal nézzen befelé.
5. Távolítsa el az egyik védőbetétet, és finoman simítsa a helyére a terméket  
Távolítsa el a másik védőbetét is, és simítsa a végleges helyére a terméket
6. Nagyon fontos, hogy a termék felülete ne gyűrődjön meg. Próbálja meg annyira kisimítani a felületet, amennyire lehetséges (ez nem biztos, hogy első sikerül, de további simítással elérhető)

### 6.2. A nedvszívó párna eltávolítása/cseréje.

A váladék mennyisége határozza meg, hogy milyen időközönként kell cserélni az Erland Care párnát. Ha megtelt, azonnal cserélni kell.

Viselési idő >24 óra.

## 7. SPECIÁLIS MEGJEGYZÉSEK

Az Erland Care egyszer használatos termék. Ha a terméket kivették a csomagból, és a betétet eltávolították, a termék használatnak minősül, amelyet nem szabad eltávolítani, és nem szabad újra felhasználni.