

1. DESCRIÇÃO DO PRODUTO

A almofada Erland Care superabsorvente é um novo produto que garante uma fixação segura e estável do saco e da placa. Isso reduz o risco de fugas sob a placa. A almofada superabsorvente é fixada diretamente na pele e absorve um grande volume de efluente dos sacos de ostomia onde o adesivo foi dissolvido.

O produto superabsorvente consiste em:

- uma camada de silicone perfurada, suave, de contato com a pele
- uma almofada interna que tem fortes propriedades de retenção de água
- um filme de poliuretano respirável

Observe:

Erland Care é indicado para uso externo apenas.

Erland Care não é estéril e não deve ser usado para infecções.

2. INDICAÇÕES

Erland Care foi desenvolvido para utilizadores de sacos de ostomia, muitos dos quais têm problemas com o adesivo na dissolução e fugas do conteúdo dos sacos de ostomia. Ao afixar Erland Care na parte externa do disco adesivo do saco de ostomia, ele reduz o risco de fuga ao estabilizar a almofada, e qualquer fuga será absorvida pela almofada. Isso permite que o utilizador evite infiltrações nas roupas e ganhe tempo para recolocar o saco de ostomia.

3. PRECAUÇÕES

Este é um dispositivo de unidade única e não deve ser reutilizado.

A reutilização de produtos descartáveis representa um grande risco para o utilizador ou paciente. Isso pode levar à contaminação e/ou prejuízo da funcionalidade do produto. A contaminação e/ou funcionalidade do produto prejudicada pode resultar em ferimentos graves ou morte.

4. CONTRA-INDICAÇÕES

Erland Care superabsorbente é contraindicado para:

- úlceras resultantes de infecção, como tuberculose ou sífilis
- infecções fúngicas profundas
- queimaduras de terceiro grau
- pacientes alérgicos a materiais superabsorventes

Se houver sinais de irritação ou infecção, entre em contato com as autoridades médicas competentes. Retome o uso quando a condição de cicatrização normal estiver presente.

5. INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA

Erland Care só deve ser usado em aplicações de ostomias.

6. INFORMAÇÕES PARA USO

6.1 Para uso normal no estoma, Erland Care é aplicado da seguinte forma:

1. Limpe cuidadosamente a área periestomal
2. Remova o produto Erland Care da embalagem
3. Afixe o saco de ostomia normalmente
4. Puxe todo o saco de ostomia através do orifício centrado no Erland Care para posicionar sob o saco de ostomia, mas em cima da superfície adesiva do saco
O lado revestido com forro protetor deve estar virado para dentro.
5. Remova um dos revestimentos protetores e alise suavemente o produto no lugar
Remova o revestimento protetor restante e continue a alisar o produto no lugar
6. É importante evitar enrugamento. Tente obter uma superfície o mais lisa possível (pode ser difícil de conseguir inicialmente, mas melhora com o alisamento contínuo)

6.2 Remoção/troca de absorvente.

O volume de exsudado determina o intervalo entre as trocas do Erland Care. Deve ser alterado imediatamente, se ficar saturado.

Tempo de utilização >24 horas.

7. NOTAS ESPECIAIS

Erland Care é um produto de uso único. Uma vez retirado da embalagem e dos revestimentos removidos, o produto é classificado como usado e não deve ser removido nem deve ser usado novamente.