

1. ÜRÜN TANIMI

Erland Care Süper emici ped, torba ve plakanın güvenli ve stabil şekilde takılmasını sağlayan yeni bir hepsi bir arada üründür. Bu, plaka altından sızıntı riskini azaltır. Süper emici ped doğrudan cilde yapıştırılır ve yapışkanın çözündüğü stoma torbalarından gelen yüksek hacimde akıntıyı emer.

Süper emici ürün şunlardan oluşur:

- delikli, yumuşak, hassas, silikon bir ciltle temas katmanı
- güçlü su tutma özelliklerine sahip bir iç ped
- efes alabilen bir poliüretan film

Lütfen unutmayın:

Erland Care sadece dışarıdan kullanım için endikedir.
Erland Care steril değildir ve enfeksiyonlar için kullanılmamalıdır.

2. ENDİKASYON

Erland Care stoma torbası kullanıcıları için geliştirilmiştir ve bu kullanıcıların birçoğu, stoma torbasındaki yapışkanın çözünmesi ve torbanın içindekilerin sızmasıyla ilgili sorun yaşamaktadır. Stoma torbasının yapışkan diskinin dışına yapıştırılan Erland Care, pedi stabilize ederek sızıntı riskini azaltır ve herhangi bir sızıntı ped tarafından emilir. Bu, kullanıcının akıntının gıysisine sızmasını önlemesini ve stoma torbasını değiştirmek için zaman kazanmasını sağlar.

3. ÖNLEMLER

Bu tek kullanımlık bir cihazdır ve tekrar kullanılmamalıdır.

Tek kullanımlık ürünlerin yeniden kullanımı kullanıcı veya hasta için büyük bir risk oluşturur. Kontaminasyona ve/veya ürünün işlevselliğinin bozulmasına neden olabilir. Kontaminasyon ve/veya ürün işlevselliğinin bozulması ciddi yaralanmalara veya ölüme neden olabilir.

4. KONTRENDİKASYONLAR

Erland Care süper emici, aşağıdakiler için kontrendikedir:

- tüberküloz veya frengi gibi enfeksiyonlardan kaynaklanan ülserler
- derin mantar enfeksiyonları
- üçüncü derece yanıklar
- süper emici malzemelere alerjisi olan hastalar

Tahriş veya enfeksiyon belirtisi gelişirse, uygun tıbbi yetkiliye başvurun. Normal iyileşme durumu mevcut olduğunda kullanmaya devam edin.

5. GÜVENLİK BİLGİLERİ

Erland Care sadece stoma uygulaması için kullanılmalıdır.

6. KULLANIM BİLGİLERİ

6.1 Stoma ile sıradan kullanım için Erland Care aşağıda belirtildiği gibi uygulanır:

1. Peristomal alanı dikkatlice temizleyin
2. Erland Care ürününü ambalajından çıkarın
3. Stoma torbasını her zamanki gibi yapıştırın
4. Tüm stoma torbasını Erland Care'daki ortalanmış delikten geçirerek stoma torbasının altında ancak stoma torbasının yapışkan yüzeyinin üstünde konumlandırın
Koruyucu arka astar ile kaplanmış yan kısım içe dönük olmalıdır
5. Koruyucu arka astarlardan birini çıkarın ve ürünü yerinde yavaşça düzeltin
Diğer arka astarı çıkarın ve ürünü yerinde düzeltmeye devam edin
6. Ürünün buruşmasını önlemek önemlidir. Mümkün olduğunca düz bir yüzey elde etmeye çalışın
(başlangıçta elde etmek zor olabilir ama sürekli düzeltme ile elde edilebilir)

6.2 Emiciyi çıkarma/değiştirme.

Sızıntı hacmi, Erland Care pansuman değişiklikleri arasındaki aralığı belirler. Doygun hale geldiğinde hemen değiştirilmelidir.

Kullanım süresi >24 saat.

7. ÖZEL NOTLAR

Erland Care tek kullanımlık bir üründür. Ambalajından çıkarıldıktan ve astarları söküldükten sonra ürün, kullanılmış olarak sınıflandırılır ve çıkarılmamalı ve tekrar kullanılmamalıdır.